



PERACTRO RŪGŠTIES LYGIO NUSTATYMO TESTINĖS JUOSTELĖS

TS 20.3.

Skirtas ANIOXYDE 1000 aktyvuotam tirpalui

INDIKACIJOS

Peracto rūgšties lygio kontrolė šaltame steriliame ANIOXYDE 1000 tirpale.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Kasdien naudokite testinę juostelę, kad patikrintumėte tirpalo aktyvumą: Seanso pradžioje arba paleidus iš naujo po pertraukos.
Kas 4 valandas iš eilės (daugiau nei 10 endoskopų per dieną).
Didelio aktyvumo laikotarpiais arba ypatingomis sąlygomis (kyla temperatūra ir pan.), gali prireikti padidinti naudojimo dažnumą arba juosteles.
- Visiškai pamirkykite reaktyviąją bandymo juostelės dalį tiriamajame tirpale 1 sekundę.
- Tirpalo perteklių pašalinkite švelniai pakratydami testinę juostelę.
- Rezultatą vertinkite praėjus 10 sekundžių po mirkymo. Niekada nevertinkite rezultato po 15 sekundžių.

LAIKYMO SĄLYGOS

Testinių juostelių tinkamumo laikas yra maždaug:

- 24 mėn. laikant nuo +2°C iki +8°C.
- 90 dienų po atidarymo.

Kolbą laikykite uždarytą, tai garantuoja testinių juostelių patvarumą.

INFO

Geltona Anioxyde 1000 tirpalo spalva rodo, kad aktyvatoriaus ir generatoriaus mišinys ką tik buvo pagamintas, bet **NENURODO**, ar tirpale yra peracto rūgšties, ar ne.

Reikėtų atsižvelgti tik į testinės juostelės spalvą.

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
Spalvotas tirpalas (geltonas) arba ne + testinės juostelės dažymas (juodas).

Nuo tamsiai mėlynos iki juodos spalvos,

- Besspalvis,
- Greitas spalvos išnykimas,
- Maži taškeliai,
- Spalvotas kraštas,



ATITINKA



NEATITINKA

