

BACTICID AF

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

Produktas naudojamas alkoholio poveikiui atsparių įvairių mažų paviršių, durų rankenų, įrankių, įrangos ir kt. greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, procedūriniuose kabinetuose, odontologijos klinikose ir kt.), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio salonuose ir kt.) bei maisto ruošimo ir gamybos vietose.

Biocidinis produktas BACTICID AF paruoštas naudojimui.

Paviršius prieš dezinfekavimą nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų.

Paviršių dezinfekavimas nuvalant: nuvalytą, švarų paviršių šluostyti BACTICID AF sudrėkinta vienkartinė servetėlė. Visą ekspozicijos laiką paviršius turi būti drėgnas. Po dezinfekcijos leisti paviršiams natūraliai išdžiūti arba nusausti vienkartinė servetėlė.

Paviršių dezinfekavimas purškiant: paviršių, įrenginius ar jų dalis iš 30 cm atstumo apipurkšti biocidiniu produktu. Rekomenduojamas produkto kiekis 50 ml/m². Visą ekspozicijos laiką paviršius turi būti drėgnas. Po dezinfekcijos leisti paviršiams natūraliai išdžiūti arba nusausti vienkartinė servetėlė.

Bacticid AF mikrobiologinis poveikis: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615:

Mikrobiologinis poveikis	Ekspozicijos laikas
Baktericidinis (įsk. MRSA, VRE)	30 sek.
Mielicidinis (C. Albicans)	30 sek.
Fungicidinis (A. Brasiliensis)	120 sek.
Mikobaktericidinis (M. Avium, M. Terrae)	30 sek.
Virucidnis (BVDV, Vaccinia virus, HIV, HBV, HCV, Norovirus)	15 sek.
Virucidnis (Adenovirus)	30 sek.
Virucidnis (Poliovirus)	120 sek.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti.

Abejojant, kad BACTICID AF gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.