

schülke →



rotasept®

rotasept® - tai naudoti paruoštas tirpalas, skirtas sukiųjų instrumentų dezinfekavimo ir valymo reikmėms

Privalumai

- Visapusiškai veiksmingas
- Puikiai pritaikytas naudoti ultragarsinėje vonelėje
- Be aldehydų
- Paruoštas naudoti

Taikymo sritys

Grąžtų, pjoviklių, deimantinių šlifuoiklių ir kitų sukiųjų tikslųjų instrumentų valymo bei dezinfekavimo rankiniu būdu reikmėms. Dėl puikių medžiagų suderinamumo savybių ir visapusiško veiksmingumo, **rotasept®** pasižymi visomis svarbiomis produkto, skirto sukiesiems tiksliesiems instrumentams bei iš plieno ir nerūdijančio plieno pagamintiems instrumentams apdoroti, savybėmis.

Naudojimo instrukcija

Tik profesionaliesiems naudotojams. **rotasept®** yra paruoštas naudoti tirpalas, todėl į grąžtų vonelę pilamas neskiestas. Jei **rotasept®** naudojamas kaip valiklis, kiekvieną nedidelį sukijį instrumentą iš karto po naudojimo pamerkite į tirpalą, kad ant paviršiaus nepridžiūtų nešvarumai. Baigę apdoroti visus instrumentus kruopščiai nuskalaukite bent geriamojo vandens kokybės vandeniu arba (pageidautina) steriliu destiliuotu vandeniu ar visiškai demineralizuotu vandeniu, kad pašalintumėte visus tirpalo likučius. **Mirkymo laikas baigiamajai dezinfekcijai atlikti: 15 minučių.** Nerekomenduojama mirkyti ilgiau, siekiant išsaugoti geriausią medžiagų suderinamumą. Darbinius tirpalus keiskite kiekvieną dieną ir tuo atveju, jei tarša aiškiai matoma. Pagal nacionalinius teisės aktus gali reikėti valymą ir baigiamąją dezinfekciją atlikti kaip dvi atskiras procedūras. Negalima maišyti su valymo priemonėmis ir dezinfekantais. Laikykitės instrumentų gamintojo nurodytų apdorojimo rekomendacijų.

Medžiagų suderinamumas. Šarmams ir alkoholiui jautraus plastiko, aliuminių dalių ir instrumentų, kurie pagaminti naudojant sintetinių dervų klijus, merkti į **rotasept®** negalima.

Šiems instrumentams rekomenduojame naudoti **gigasept® instru AF**.

Ultragarso vonelė

rotasept® yra puikiai pritaikytas naudoti ultragarso vonelėje.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Veiksmingumas	Koncentracija	Poveikio trukmė
Baktericidinis EN13727, EN14561, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Mikobaktericidinis EN14348, EN14563, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	15 min.
Mielicidinis EN13624, EN14562, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Fungicidinis EN13624, EN14562 - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Virucidinis EN14476, EN17111 - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	1 min.
Virucidinis pagal DVV (Vokietijos virusinių ligų kontrolės asociacija)/ RKI gaires	paruošta naudoti	5 min.

Sertifikatai

- VAH sertifikatas
- Įtraukta į IHO sąrašą



CE 0297



Naudojimo instrukcija

Įspėjimai

/... e imlaci rrm wp_0g0 tci jg0h0 kcbH_00: 1,6 g kalio hidroksido, 10,0 g propan-2-olio, 0,1 g 2-etilheksanolio. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004: < 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos.

Techniniai duomenys

Spalva	bespalvė
Tankis	apyt. 1,00 g / cm ³ / 20 °C
Pliūpsnio temperatūra	36 °C / Metodas: DIN 51755, 1 dalis
Forma	skystis
pH	13,7 / 20 °C

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Apie sunkius su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos. Laikyti originalioje pakuotėje. Pasibaigus produkto tinkamumo naudoti laikui produkto nenaudokite.

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
rotasept® -INT-2 l buteliukas	5 vnt. dėžutėje	Paprašius
rotasept® -INT-5 L	1 vnt. bakelis	Paprašius

Šie produktai parduodami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės	Prekės Nr.
Raktas 5 l ir 10 l bakeliui atidaryti	135810
schülke dozavimo pompa 5 l / 10 l (20ml per taką)	117101
Kranelis 5 l ir 10 l bakeliui	135502

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišką būdą ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visu pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com
Konkrečiais klausimais kreipkitės prašymų priėmimo skyriaus tel. +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com.



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos valstybės įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GGP atitikties sertifikatais, taikomais vaistams.

schülke pagrindinė buveinė
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Platintojas
„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 2450 415
Faksas +370 5 2706 201
El. paštas info@sanovus.lt