

Sani-Cloth® AF: Naudojimo instrukcija

Valymo ir dezinfekavimo servetėlės be alkoholio

Laikykitės vietos sveikatos priežiūros taisyklių dėl asmeninių apsaugos priemonių, rankų higienos ir atliekų šalinimo rekomendacijų

Pasiruošimas



Išėmimas



Ištraukite servetėlę 45° kampu nuo savęs.
Uždarykite dangtelį, jei servetėlės nenaudojamos.

Valymas



Jei paviršius yra akivaizdžiai nešvarus, valykite jį S formos judesiais nuo viršaus į apačią.

Jei reikia, naudokite papildomas servetėles.

Naudokite šviežią servetėlę kiekvienam naujam paviršiui.

Dezinfekavimas



Šviežia servetėle dezinfekuokite paviršių S formos judesiais nuo viršaus į apačią vengdami kryžminio užteršimo.

Naudokite šviežią servetėlę kiekvienam naujam paviršiui.

Kontakto laikas



Siekiant atlikti dezinfekciją, paviršius turi būti akivaizdžiai šlapias 2 minutes.

Jei reikia, naudokite papildomas servetėles.

Palaukite, kol paviršius išdžius.

Atliekų šalinimas



Išmeskite servetėlę po naudojimo
Servetėlės pakuotė yra perdirbama



Kita informacija:

*Laikykite vertikaliajoje padėtyje
vėsioje sausoje vietoje*

*Saugokite nuo sąlyčio su akimis, oda
ir drabužiais*

*Patikrinkite galiojimo datą ant
pakuotės*

Maždaug 1 servetėlė 1 m²

Jei jums reikia daugiau informacijos, kreipkitės adresu contact@pdi-emea.com