

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. PNO4525
3 priedas

CLINO'WIPES

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Paruoštos naudoti drėgnos servetėlės skirtos nedidelių paviršių dezinfekcijai, pasižymi baktericidiniu, mielicidiniu, fungicidiniu, sporicidiniu ir virudiciniu poveikiu.

Prieš naudojant servetėles, užsimauti apsaugines pirštines. Išėmus servetėlę iš karto sandariai uždaryti pakuotę, kad servetėlės neišdžiūtų. Kruopščiai nuvalyti paviršių, jį visą sudrėkinant. Pasirenkamas tinkamas ekspozicijos laikas, reikalingas produkto antimikrobiniam poveikiui užtikrinti (žemiau nurodytas produkto efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais).

Efektyvumas nešvariomis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai (ekspozicijos laikas, būtinas tam tikram konkrečiam poveikiui):

Baktericidinis poveikis:

pagal EN 1276 ir EN 13727, EN 13697 ir EN 14561 – 5 min.;

pagal EN 16615 – 2 min.

Mielicidinis poveikis:

pagal EN 1650, EN 13624 ir EN 13697 – 5 min.;

pagal EN 14562 – 10 min.;

pagal EN 16615 – 2 min.

Fungicidinis poveikis:

EN 13624 ir EN 14562 – 10 min.

Tuberkuliocidinis poveikis:

Pagal EN 14348 – 10 min.

Sporicidinis poveikis:

Pagal EN 13704 (*Clostridium difficile*) – 15 min.

Virucidinis poveikis:

pagal EN 14476 – 10 min.

Visą ekspozicijos laiką paviršius turi išlikti drėgnas (jeigu reikia, nuvalyti paviršių dar kartą).

Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maisto produktais, oda ar gleivine, gerai nuplauti vandeniu. Kitų paviršių nuplauti nereikia, nebent paviršiaus dangos gamintojas nurodo kitaip. Tuomet leisti paviršiams nudžiūti arba nuvalyti sausa servetėle.

Naudojimo vietose paviršiai turi būti valomi ir dezinfekuojami vadovaujantis šią taikymo sritį reglamentuojančiomis Lietuvos higienos normomis.

Atsargumo priemonės

Nenaudoti išdžiūvusių servetėlių.

Nenaudoti kartu su kitais valikliais.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Abejojant, kad darbinis tirpalas gali gadinti paviršių, išbandyti ant nedidelio ploto.

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje.

Panaudotas servetėles ir pakuotes išmesti kaip pavojingas atliekas.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos