



schülke -t

Švelniai šarminis, fermentų turintis didelio efektyvumo ploviklis automatizuotai pakartotinio apdorojimo procedūrai

thermosept® X-tra enziminis ploviklis

Npgt_jsk_q

- Lcnpqci_ggrgle_tjwkmimiw`Ÿ*ispqan_qqcirgjcqbHg_qqlcpeglgq dcpkclre_gp_irwtghe_n_tpgg_sq_kcbHg_eēbcpglwq
- Slgtcpq_jsqgnpcibgk_q_srmk_rgxsmr_g_n_i_prrrglqm_nbmprmgkmnmacbθp_g^r_gimk_qqt_gpgmqcqpgrwqc
- Bgbcjgq_cimlmkglgqcdcirwtskaqbñj_k_Amqb_p`gIñqimlaclrp_aghmq
- Tcprn_ggq_se_lrgqmnrgkpxsmr_q_kcbHg_eēqsbcpql_ksk_q
- Mažai putojantis
- Pagamintas tik iš nepavojingų medžiagų, todėl itin patogus naudoti

Taikymo sritis

thermosept® X-tra fermentinis ploviklis yra fermentinis valymo koncentratas, skirtas termostabilių ir šilumai jautrių medicinos priemonių, pvz., chirurginių instrumentų, MIS ir mikroinstrumentų, robotizuotų instrumentų, talpyklų, laboratorijos reikmenų ir stiklo, chirurginės avalynės, basonų ir kitų dažniausiai steriliuose skyriuose naudojamų medicinos priemonių bei standžiųjų ir lanksčiųjų endoskopų, įskaitant endoskopinius priedus, automatizuotai pakartotinio apdorojimo procedūrai. **thermosept® X-tra** fermentinis ploviklis pritaikytas naudoti plovimo mašinose / dezinfekuojančiuose plautuvuose (WD) ir talpyklų plovimo mašinose pakartotiniam apdorojimui terminiu būdu. Produktą tinka naudoti kartu su dezinfekavimo komponentais **thermosept® ED** (glutaraldehido pagrindu) ir **thermosept® PAA** (peroksiacto rūgšties pagrindu), atliekant chemoterminę pakartotinio apdorojimo procedūrą automatiniuose endoskopų pakartotinio apdorojimo aparatuose (AER). Nepriekaištingą valymo kokybę lemia novatoriškas ploviklis, naudojamų kartu su puikių veikliųjų savybių fermentais, derinys.

Naudojant net ir nedidelėmis dozėmis, **thermosept® X-tra** fermentinis ploviklis pašalina organinius teršalus, pvz., kraują, baltymus, audinių likučius ir gleivinės bei riebiąsias priemaišas. Sinerginis aktyviųjų medžiagų derinys leidžia ploviklį puikiai naudoti kartu su įvairiomis medžiagomis, net ir jautriomis, pvz., su anodiniu aliuminiu ir spalvotuoju metalu.

Didesnė nei 10 pH vertė, dešimties minučių valymo trukmė ir didesnė fiksavimo bei baltymų proceso temperatūra valymo etapo metu – **thermosept® X-tra** fermentinis ploviklis padeda sumažinti vCJK ligos riziką, kaip nurodyta Vokietijos RKI rekomendacijoje.

Naudojimo instrukcija

Dozavimas

Standartinė koncentracija: 0,5% (5 ml/l).
Priklausomai nuo užterštumo stiprumo: 0,3 - 1,0% (3 - 10 ml/l).
Endoskopų pakartotiniam apdorojimui: 35 - 55 °C, 3 - 10 min.
Chirurginių instrumentų pakartotiniam apdorojimui: 40 - 60 °C, 5-10 min.

Dozavimas, valymo trukmė ir temperatūra priklauso nuo užterštumo stiprumo ir plovimo reikmenų tipo. Dozavimas atliekamas naudojant mašinoje integruotas dozavimo pompas. Nemaišykite koncentrato su kitomis cheminėmis medžiagomis. Rekomenduojama naudoti demineralizuotą vandenį. Atkreipkite dėmesį į mašinos ir instrumentų gamintojų pateiktas rekomendacijas.



thermosept® X-tra fermentinis ploviklis

Produkto duomenys

Sudėtis

Anijoninės ir nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, fermentai, solubilizuojančios medžiagos ir korozijos inhibitoriai.

Fizikinės cheminės savybės

Tankis: apyt. 1,06 g/cm³ / 20 °C / 1,013 hPa

Spalva: geltona

Pliūpsnio temperatūra: > 102 °C / Metodas: ISO 3679

Forma: skystis

pH: apie 10,7 / 100 % / 20 °C

Dinaminė klampa: apie 4mPa*s / Metodas: ISO 3219

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visus pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com

Konkrečiais klausimais kreipkitės prašymų priėmimo skyriaus telefonu +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą. Tik profesionalaus naudojimo reikmėms. Apie rimtus su produktu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai. Atlikti neutralizavimo, reikalingo klasikinių šarminių valymo priemonių atveju, nereikia. Ruošiant akių srities instrumentus, prieš atliekant terminį dezinfekavimą, rekomenduojama iš anksto du kartus praplauti išvalytu vandeniu arba naudoti neutralizuojančią priemonę **thermosept® NKZ**. Atkreipkite dėmesį į mašinos ir instrumentų gamintojų pateiktas rekomendacijas. Talpyklą laikykite sandariai uždarytą. Saugokite nuo karščio, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje (laikymo temperatūra: 5 - 25 °C).

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
thermosept X-tra enz.cleaner 200 I FA	1 vnt. statinė	Paprašius
thermosept X-tra enz.cleaner 500 I EC	1 vnt. talpykla	Paprašius
thermosept X-tra enz.cleaner 5 I KA	1 vnt. bakelis	Paprašius
thermosept X-tra enz.cleaner 10 I KA	1 vnt. bakelis	Paprašius
thermosept X-tra enz.cleaner 20 I KA	1 vnt. bakelis	Paprašius
thermosept X-tra enz.cleaner BHT Pin 5 I KA	1 vnt. bakelis	Paprašius

Šie produktai parduodami ne kiekvienoje šalyje. Norėdami sužinoti daugiau, susisieki su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės	Prekės Nr.
20 ir 25 l bakelio atidarytuvas	135901
5 ir 10 l bakelio atidarytuvas	135810

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomiškai būdu ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos Vaistų įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GMP atitikties sertifikatais, taikomais vaistams.

Schülke pagrindinė buveinė
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Igaliotasis atstovas Lietuvoje
"Sanovus", UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 2450 415
Faksas +370 5 2706 201
info@sanovus.lt